

Examen de laboratorio: Toxoplasmosis

Inmunofluorescencia Indirecta

ELISA

ISAGA

PCR cualitativa.

Tipo de muestra:

Suero o Sangre Entera

Preparación del paciente: no es necesario el ayuno, siempre y cuando el paciente no refiera haber desayunado, almorzado o cenado alimentos con alto contenido graso (en dietas hipocalóricas, los triglicéridos exógenos producen opalescencia del suero llevando a interferencias metodológicas).

Obtención de la muestra: por punción venosa, recolectada en tubo seco para técnicas serológicas. Para su envío, centrifugar la muestra y fraccionarla en 2 o 3 tubos eppendorf en alícuotas de 1ml aproximadamente. En el caso de bebés, el volumen enviado puede ser menor.

(No enviar muestras con elevado grado de hemólisis)

Para técnicas moleculares recolectar en tubo con EDTA

Envío:

Las muestras deberán ser enviadas refrigerada, sin cortar la cadena de frío. De no enviar la muestras **suero** dentro de las 48 hs enviar la misma congelada.

El envase para el transporte de muestra deberá ser el apropiado según normas internacionales para el transporte de material biológico con interior con divisiones para tubos.

Si no se cuenta con dicho material, se podrá enviar en conservadora, cada material biológico contenido en su interior deberá estar dentro de bolsas selladas correctamente. Todo el recipiente conteniendo el material en su interior debe estar correctamente sellado y rotulado.

El tiempo de transporte no deberá superar las 48 horas.

Rotulación de las muestras: cada muestra deberá tener un rotulo que indique:

- Apellido – Nombre del paciente,
- Fecha de toma de muestra,
- Número de muestra

Ficha epidemiológica – Historia clínica: cada muestra debe estar acompañada de su correspondiente ficha epidemiológica (correctamente llenada). Esta ficha deberá ser completada por el médico solicitante.

La misma debe enviarse en bolsa sellada junto a los tubos, para evitar que se humedezca.