

**Examen de laboratorio: Enteroparasitosis**

**MÉTODOS DE ENRIQUECIMIENTO:** Método de Ritchie (formol-éter), Método comercial Mini Parasep R SF, Método de flotación de Faust (sulfato de zinc al 33%), Método de sedimentación – centrifugación.

**Tipo de muestra:**

**-Materia fecal**

Muestra seriada de 6 días en formol o SAF (Solución acético formolada) al 5% ó 10 %.  
(SAF: 18 g de acetato de sodio, 20 ml de ácido acético, 40 ml de formol, 20 ml de glicerina, y agua destilada cantidad suficiente para 1000 ml)

**Conservación y envío:**

En frascos con formol o SAF al 5 % o 10 %.

**Demora del resultado:**

Cinco días hábiles.

**ESCOBILLADO ANAL**

## **Muestra**

### **-Mucus anal.**

En la noche anterior no se debe higienizar el ano con agua ni colocar en esa zona talco, pomadas, tampoco ir de cuerpo antes de realizar la operación. A la mañana siguiente al despertar, en lo posible antes de levantarse, pasar una gasa humedecida en agua de la canilla sobre los márgenes del ano y colocar la misma en un recipiente que contiene formol al 5 % ó 10 %. Repetir el procedimiento durante siete días.

### **Conservación y envío:**

En frascos con formol o SAF al 5 % ó 10 %.

### **Demora del resultado:**

Cinco días hábiles

## **TEST DE GRAHAM**

## **Muestra**

### **-Mucus anal.**

En la noche anterior no se debe higienizar el ano con agua ni colocar en esa zona talco, pomadas, tampoco ir de cuerpo antes de realizar la operación. A la mañana siguiente al despertar, en lo posible antes de levantarse, contactar la parte engomada de una cinta adhesiva transparente con los márgenes del ano y adherir la cinta a un portaobjetos limpio, tratando de no formar pliegues ni burbujas de aire. Se debe repetir este procedimiento en forma idéntica, durante siete días consecutivos.

**Conservación y envío:**

En recipientes herméticos

**Demora del resultado:**

Cinco días hábiles.

**COLORACIONES PERMANENTES**

**Coloración tricrómica modificada de Gomori – Wheatley para protozoarios intestinales**

**Muestra**

**-Materia fecal**

Una deposición de materia fecal preferentemente diarreica en PVA (alcohol polivinílico).

**Conservación y envío:**

En recipientes herméticos con PVA.

**Demora del resultado:**

Seis días hábiles.

## **COLORACIÓN MODIFICADA DE ZIEHL- NEELSEN PARA COCCIDIOS INTESTINALES**

### **Muestra**

#### **-Materia fecal.**

Una muestra de materia fecal preferentemente diarreica en SAF o en formol al 5% o 10%.